

BARRAS DE BAÑO MODELOS AD502LUX / AD505LUX / AD506LUX


Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

USOS


Ayuda a las personas discapacitadas a levantarse o sentarse.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Estas barras deben ser instaladas por un profesional con experiencia, que escogerá los elementos físicos apropiados para una instalación correcta.
- Se deben usar todos los agujeros de fijación tanto en la pared como en el suelo (A). La barra debe apretarse bien, de modo que sea capaz de soportar el peso completo de una persona mediana en el punto D, sin que rebote la barra.
- Los modelos AD505LUX y AD506LUX no son graduables en altura, y deben ser instalados a la altura adecuada.
- El modelo AD502LUX es de altura regulable y se debe montar en el suelo, para ajustar la barra a la altura deseada, aflojar el pomo B y deslizar la barra a dicha altura, después apretar con firmeza el pomo de cierre (la altura óptima coincide aproximadamente con el centro de la columna)
- Todas las barras se pueden plegar cuando están fuera de uso.

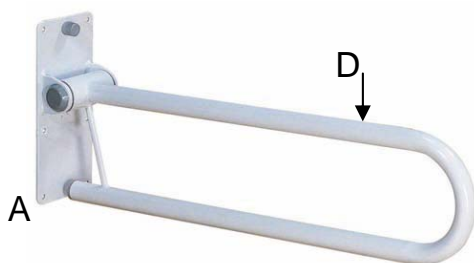

AD505LUX (55cm)
AD506LUX (76cm)

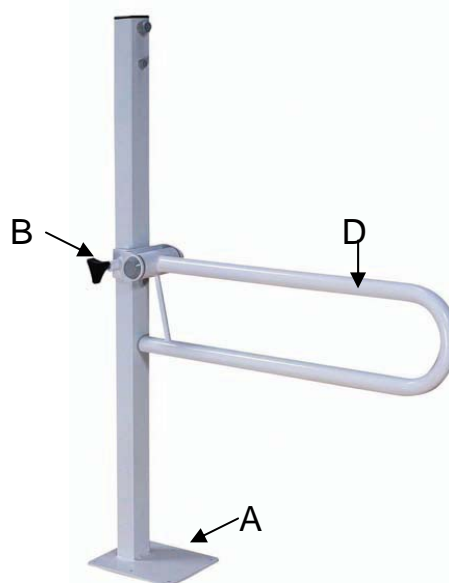

AD502LUX

CUIDADO Y LIMPIEZA

Las barras se pueden limpiar con un detergente neutro y agua.

CUIDADOS ESPECIALES

- Estas barras deben ser instaladas por un profesional con experiencia.
- Asegurarse que la barra este bien fija en su sitio antes de cargar peso sobre ella.
- En el modelo de altura regulable, hay que asegurarse de que el pomo de ajuste esté firmemente apretado.

GARANTIA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:

Ayudas Dinámicas

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com

www.ayudasdinamicas.com

