

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)



## Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD538U



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

**Descripción**

Asiento para la ducha con patas, construido con materiales inoxidables y con un recubrimiento en pintura de epoxi. Las patas del asiento proporcionan una buena estabilidad. Los orificios de desagüe, impiden que se acumule agua y suciedad en el asiento. El asiento es abatible para dejar más espacio libre en la ducha cuando no es necesaria su utilización.

En el modelo AD538U el asiento tiene una abertura en forma de U, para facilitar la higiene íntima.

**Instalación**

Solamente un profesional debe ser el encargado de instalar el asiento. Sólo una persona experta sabrá evaluar si la pared es idónea para este asiento y escoger los sistemas de fijación necesarios. Ayudas Dinámicas recomienda siempre utilizar sistemas de fijación de acero inoxidable.

Le recomendamos que en caso de duda respecto del tipo de fijaciones a utilizar, consulte a un fabricante de fijaciones. Debido a la gran variedad de tipos de construcción de paredes y a su estado de conservación, en Ayudas Dinámicas no podemos especificar el tipo de fijaciones (tornillería, tacos...) que Vd. debe utilizar en cada caso.

Este asiento es regulable en altura para adaptarse a cada usuario, así que antes que nada debe regular la altura de las patas extensibles según su conveniencia. Para saber cuál es la medida necesaria según el usuario, mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Dispone de 5 posiciones con una distancia de 2,5 cm entre cada una de ellas. El rango total va de 45 cm a 55 cm.

Para esta operación no precisa ninguna herramienta. Ambas patas se deben regular a la misma altura.



**IMPORTANTE:** Para su seguridad, las patas deben quedar a 90 grados con el suelo.

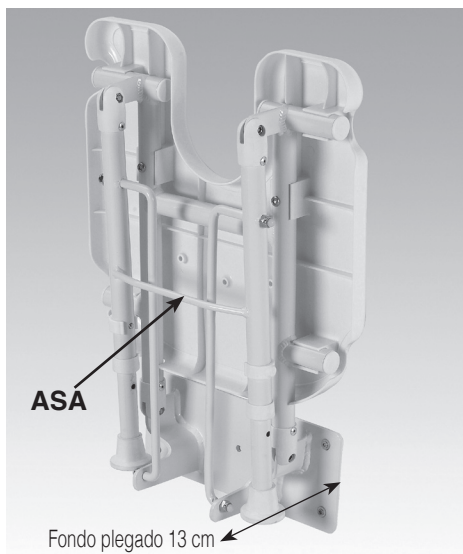
Una vez ha regulado la altura del asiento según la altura del usuario, puede proceder a montarlo sobre la pared en la que lo va a instalar. Utilice todos los orificios disponibles para fijaciones del asiento. En ningún caso agrande los orificios del asiento, esto reduciría la fuerza del chasis además de invalidar la garantía.



**PELIGRO:** Una vez ha fijado el asiento a la pared a la altura deseada, **no debe bajo ninguna circunstancia**, cambiar la altura de las patas telescópicas. Esto cambiaría totalmente las características del asiento afectando seriamente a su seguridad.

**Plegar y desplegar**

Para plegar contra la pared el asiento, simplemente tire del mismo hacia arriba por su borde exterior, (el más próximo a Vd.). El asiento deja de ser un obstáculo cuando no lo necesitamos y deja más espacio libre en la ducha. Para bajarlo y utilizarlo, **tire del asa** que une las dos patas hacia Vd. y abata el asiento hasta que descansa sobre sus dos patas.

**IMPORTANTE:**

Nunca tirar del asiento para bajarlo. Usar el asa. No se ponga de pie sobre el asiento.

**Datos técnicos**

**Asiento:** 37cm ancho x 40cm fondo

**Fondo total:**.....50 cm

**Espacio entre el asiento y la pared:**.....9 cm

**Pletina de pared:**.....30x12 cm

**Altura regulable:**.....de 45 a 55 cm

**Fondo plegado:**.....13 cm

**Peso:**.....2,62 kg



## **Limpieza**

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

Este producto debe limpiarse periódicamente para eliminar pelos y otro tipo de detritus que se puedan acumular. Se puede limpiar con cualquier detergente suave corriente y no abrasivo. Cuando sea necesaria la desinfección, proceda según los protocolos establecidos, aunque teniendo en cuenta los posibles efectos de productos químicos agresivos sobre el plástico del asiento abatible.

## **Responsabilidad por daños o defectos**

Debe Vd. informar al vendedor, quién está obligado a reparar el artículo en un plazo breve o a sustituirlo por otro idéntico. Queda excluido cualquier otro derecho.

La firma fabricante AYUDAS DINAMICAS se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas que sean en interés de la mejora del producto.

## **GARANTÍA**

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importado por:  
**Ayudas Tecno Dinámicas S.L.**  
c/Llobregat, 12  
08130 Santa Perpètua - Barcelona  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
info@ayudasdinamicas.com  
www.ayudasdinamicas.com



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

AD500U Versión 1.0 - 2015/05