



Elevadores de WC 'Ashby y Derby'

AD507/AD508

<https://www.ayudasdinamicas.com/elevadores-de-wc-ashby-y-derby/>



www.ortopediaguzman.com

Descripción


Elevadores universales de WC. Se adaptan a casi todas las tazas de inodoro. De construcción plástica de una sola pieza para una higiene total. Se montan fácilmente sin herramientas.

Escoger el asiento adecuado



En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.



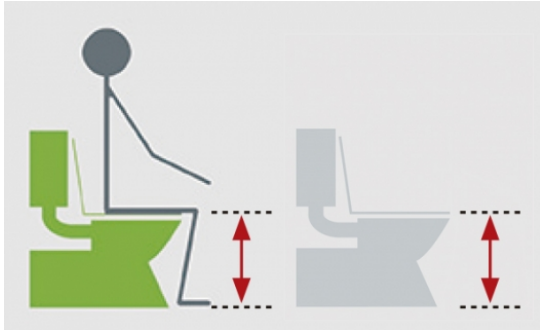

1. Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
2. Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
3. La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 5, 10 y 15 cm.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD508C	AD507	AD508A	AD507-LUX	AD508A-LUX
ALTO	5 cm	10 cm	15 cm	10 cm	15 cm
TAPA	No	No	No	Sí	Sí
ANCHO ORIFICIO	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
FONDO ORIFICIO	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm

