

www.ortopediaguzman.com



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO - AD 540

www.ortopediaguzman.com



www.ortopediaguzman.com

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL TABURETE DE BAÑO

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.

Los taburetes de baño son fáciles de manejar y ofrecen mayor seguridad al paciente.

Indicaciones

El taburete de baño sirve como asiento para la ducha. Está indicado para personas con dificultades para estar de pie.

Advertencias de seguridad / Utilización


- El taburete de baño debe apoyarse de forma segura en las 4 patas. Existe el peligro de resbalar al sentarse o levantarse en duchas húmedas, especialmente cuando utilice jabón.
- Después de cada montaje y desmontaje del taburete controle la estabilidad y compruebe que todas las patas están reguladas a la misma altura.
- No se incline demasiado hacia delante o hacia atrás.
- Asegúrese después de cada uso, que el taburete está fijo y seguro en la ducha.

Entrega


El taburete se entrega en una caja de cartón. 1 x asiento. 4 x patas (telescópicas)

www.ortopediaguzman.com


Montaje

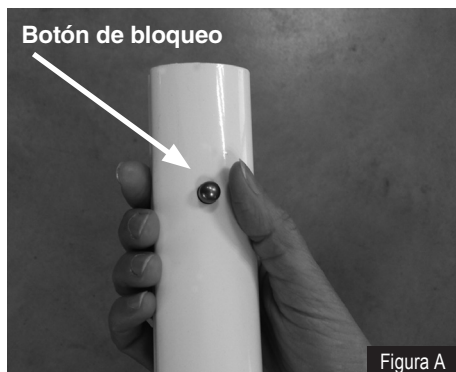

1. Presione los botones de bloqueo (Figura A) e inserte las patas al asiento por el extremo opuesto a las conteras.

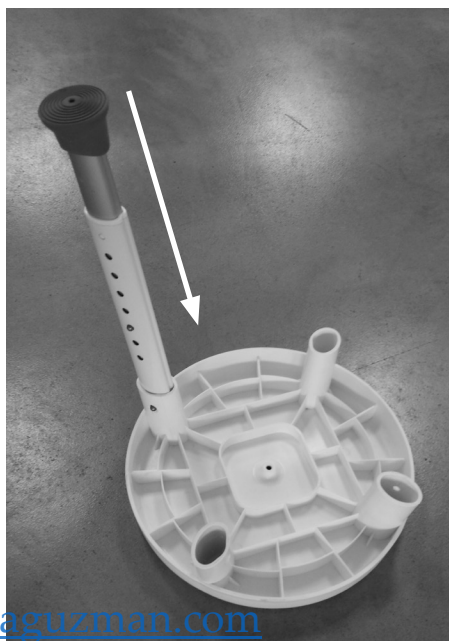

www.ortopediaguzman.com

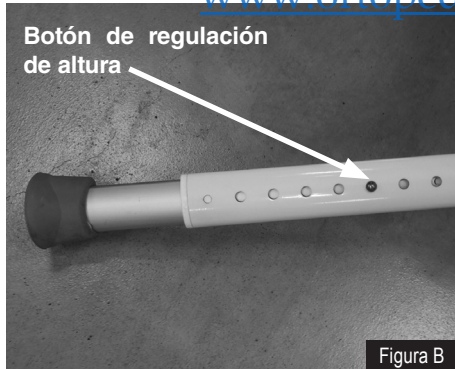

2. Ajuste las patas presionando el botón de regulación de altura (Figura B). Asegúrese de que las cuatro patas quedan todas a la misma medida.



Limpieza

La limpieza y desinfección debe realizarse regularmente (si cambia de usuario debe realizarse de manera obligatoria). Para limpiar utilice un jabón suave sin aditivos abrasivos.

Datos técnicos

- Carga máx. 110 kg
- Superficie de asiento: 34 cm
- Altura del asiento: 42 - 57 cm

GARANTÍA

www.ortopediaguzman.com

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

www.ortopediaguzman.com



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



www.ortopediaguzman.com

AD540 - Versión 1.1 - 2015/12