



www.ortopediaguzman.com

Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO
AD 952 - AD 952/E - AD 952/4 - AD 953

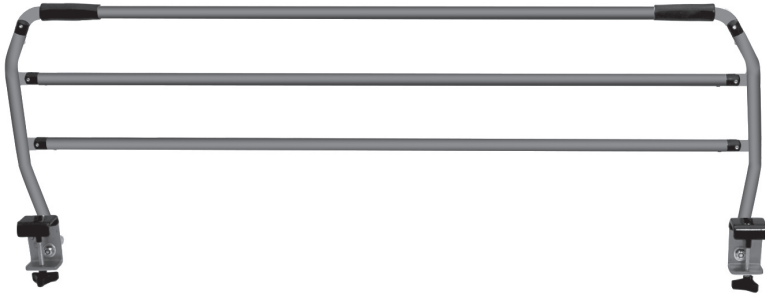

www.ortopediaguzman.com

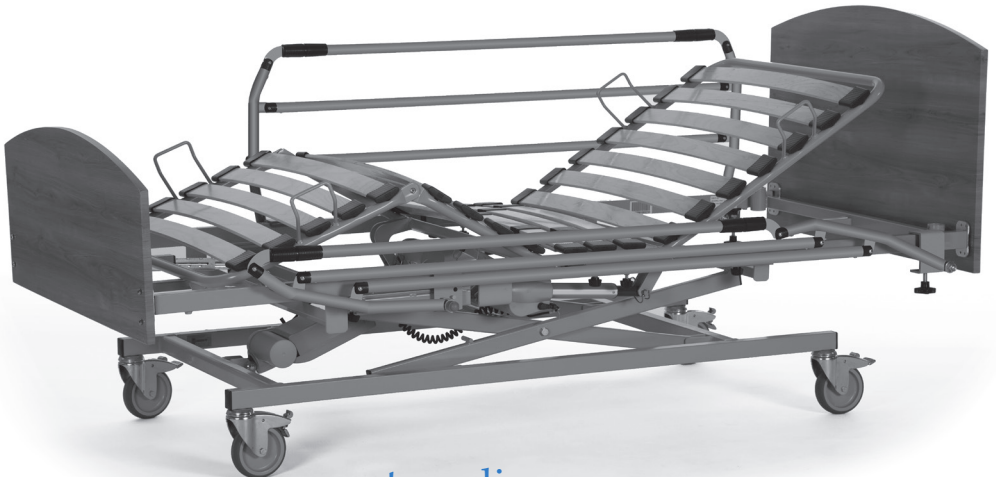

www.ortopediaguzman.com

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LAS BARANDILLAS PARA CAMA

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.

Las barandillas para cama son fáciles de manejar y ofrecen mayor seguridad al paciente.

Se han diseñado para que las maneje otra persona (cuidadores, familiares, etc.) nunca el propio paciente. Estas barandillas son adaptables a la mayoría de las camas.

Descripción y uso

Las barandillas sirven para la prevención de caídas de la cama y solo son una medida de seguridad complementaria. Estas barandillas adaptables a la mayoría de las camas son de gran utilidad para evitar accidentes a la hora de mover a la persona en la cama.

Avisos importantes de seguridad

- Nunca fuerce las barandillas ni las deje caer al manipularlas.
- Asegúrese que están bien instaladas y quedan firmemente ancladas a la cama. Recuerde que le hemos ofrecido diferentes anclajes para que se adapten a su cama en particular.
- Compruebe el correcto funcionamiento del sistema de bloqueo de las barandillas que impide que éstas bajen de forma involuntaria.
- El sistema de bloqueo debe quedar siempre a los pies de la cama para que el paciente no tenga acceso a ellos.

Datos técnicos

Mod. AD 952 **2 anclajes disponibles**



Estrecho: medida interior 28 x 85 mm

Ancho: medida interior 42 x 85 mm

Mod. AD 952/4 **1 anclaje disponible**



Ancho: medida interior 42 x 85 mm

Mod. AD 953 **1 anclaje disponible**



Estrecho: medida interior 28 x 85 mm

www.ortopediaguzman.com

Instalación y montaje

Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine cada barandilla en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor donde Vd. ha adquirido el producto.

Instrucciones de montaje

Las barandillas se suministran por pares, una derecha y otra izquierda. Teniendo en cuenta que el tirador de bloqueo va en los pies de la cama.

1. Coloque las dos mordazas de la barandillas en la estructura de la cama, colocando el tirador de bloqueo siempre a los pies de la cama, teniendo en cuenta que la distancia entre la barandilla y el piecero o cabezal de la cama no debe ser mayor a 6 cm ni menor a 30cm.
2. Apriete los tornillos con pomo (Figura 2) de los anclajes asegurándose que queden firmemente sujetos al marco de la cama.
3. Apriete las tuercas de seguridad (Figura 2) situadas en los tornillos de los anclajes para asegurar que no se aflojen con el uso.
4. Realice algunas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento (desplegar/plegar), accionando el tirador (Figura 1) situado en los pies de la cama tanto para desplegar como para plegar las barandillas.

Tirador de bloqueo



Figura 1

Tuerca de seguridad



Figura 2

Pomo con tornillo



Para pacientes inquietos recomendamos protectores acolchados de barandilla. Nuestra ref. RC 900 impide al paciente golpearse contra las barandillas y sacar los miembros fuera de la cama.

Instrucciones de uso

Para desplegar la barandilla:

Tire del pomo del tirador de bloqueo (Figura 1) y levante la barandilla con una mano por el puño, situado en la barra horizontal superior, hasta que ancle con el sistema de bloqueo.



Advertencia: compruebe que está perfectamente sujeta realizando un movimiento longitudinal contrario a la propia barandilla y comprobando que el pasador de bloqueo está bien insertado en su alojamiento. Compruebe siempre que la barandilla está bien sujeta y bloqueada antes de dejar al paciente sin supervisión.

Para plegar la barandilla:

Tire del pomo del tirador de bloqueo (Figura 1) e inicie el movimiento de plegado con una mano por el puño de la barra horizontal superior. Suelte el pomo del tirador de bloqueo mientras realiza el movimiento de plegado y baja la barandilla a su posición inferior.



Para alargar la vida del producto, no la deje caer con todo su peso sino mejor acompañe la barandilla en su recorrido de bajada. No tema atraparse la mano, la barandilla ha sido diseñada para impedirlo.

Mantenimiento y comprobaciones periódicas

- Revise que están perfectamente sujetas realizando un movimiento longitudinal contrario a la propia barandilla. Debe apretar los pomos de los anclajes en el caso que no estén bien sujetas.
- Es importante comprobar regularmente que el tirador de bloqueo funciona correctamente, plegando y desplegando la barandilla. Tiene que comprobar que el tirador (Figura 1) queda bien sujeto en el anclaje de la barandilla, que está situado a los pies de la cama.

Limpieza

No utilice detergentes abrasivos para limpiar el caminador. Un paño suave y agua jabonosa tibia son normalmente suficientes para mantenerlo limpio.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

