

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)



# Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD230AD /  
AD233AD / AD232



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

Esta ayuda está fabricada para el uso de personas con un peso máximo de 100Kg. Las personas que sobrepasan este peso quedan excluidas de su uso.

**Los andadores aquí descritos sólo pueden utilizarse sobre un suelo plano y firme.**

## DESPLEGADO


Abra el andador hasta oír un clic. Compruebe que el andador no se puede cerrar de nuevo, para comprobar que está bloqueado en la posición de uso.

## PLEGADO

Coloque el andador delante suyo, en posición de uso y sujetándolo por los puños. Sujetando uno de los puños, presione el pulsador central con la otra mano.

Mueva el lateral hacia dentro, siempre sujetando el andador por los puños y este quedará plegado.

Repita la operación con el otro lateral.

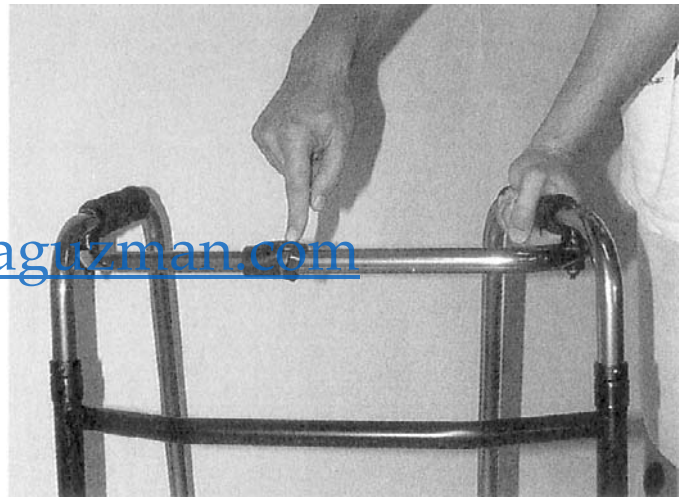

El andador sólo tiene estabilidad cuando está totalmente desplegado.

Asegúrese que al plegarlo no se le enreden la ropa u otros objetos, tenga cuidado también de no pillarse los dedos al plegar su andador.

Para su seguridad, las manos deben estar siempre en los puños acolchados cuando se opera con el andador y cuando se pliega.


## REGULACIÓN

El ajuste de altura se regula de 79 a 91cm en los modelos AD230AD y AD233AD y de 78 a 90cm en el modelo AD232.

Presione con los dedos en los botones metálicos de las patas telescópicas.

Extraiga o introduzca las patas hasta el punto deseado.

Asegúrese de que los botones metálicos sobresalen de las patas y están totalmente encajados en su posición.

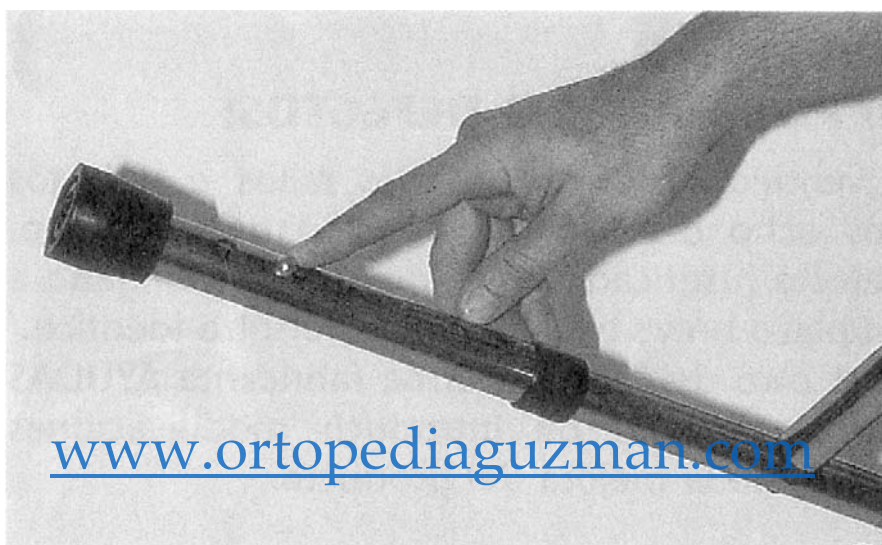

Es muy importante para la estabilidad que las cuatro patas estén graduadas a la misma altura.

## DATOS TECNICOS

Todos los modelos están fabricados en aluminio.

Modelo	AD233	AD230	AD232
Peso	2,5kg	2,5kg	2,8kg
Largo	45cm	45cm	47cm
Ancho	55cm	52cm	58cm
Altura graduable	79-91cm	79-91cm	78-90cm

## MANTENIMIENTO

Todos los andadores de AYUDAS TECNO DINAMICAS, S.L. están fabricados utilizando solamente materiales de primera calidad, por lo que con un sencillo cuidado metódico, su andador mantendrá su buen aspecto durante años. Para mantener el brillo, frote regularmente con un trapo limpio y seco. Si la suciedad es considerable, conviene utilizar un detergente comercial no abrasivo.

## RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O DEFECTOS

Debe informar al vendedor de los posibles fallos o defectos inmediatamente o a los ocho días de la recepción del producto. Cuando exista algún defecto justificado el vendedor está obligado a reparar el artículo en un plazo breve o a sustituirlo por otro idéntico. Queda excluido cualquier otro derecho. Queda reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas que sean para la mejora del producto.

## GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:

**Ayudas Dinámicas**

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)

[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

