

www.ortopediaguzman.com



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO - AD 250



www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL CAMINADOR

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.

Los caminadores son fáciles de manejar, ligeros y maniobrables. Gracias a ellos, las personas con movilidad reducida son más independientes en sus desplazamientos.

Descripción y uso

El caminador está fabricado en acero y viene equipado con un asiento acolchado de 40 x 20 cm. Está recomendado utilizarlo en interiores y para desplazamientos cortos, exclusivamente sobre superficies planas y sin desnivel.

Avisos importantes de seguridad

Es imprescindible observar las siguientes indicaciones de utilización y mantenimiento:

- Antes de cualquier utilización, compruebe que el producto le haya sido entregado en perfecto estado.
- Póngase en contacto con el vendedor si tiene dudas respecto a las limitaciones de uso, al ajuste o al mantenimiento del producto.
- No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en las especificaciones del producto.
- Procure siempre que el producto se adapte a sus necesidades. En caso de duda, consulte con un profesional de la salud.
- Haga sustituir inmediatamente las piezas gastadas, dañadas o faltantes.
- No deje o almacene el producto en el exterior.
- Compruebe periódicamente la estabilidad y rigidez del producto, y en su caso, el correcto ajuste de los tornillos y el estado de las conteras de goma.
- Es imprescindible prestar mucha atención cuando se utiliza el producto sobre una superficie húmeda.

Datos técnicos

Modelo AD 250

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| - Peso 5,6 kg | - Ancho 58 cm | - Fondo 58 cm |
| - Peso máx. 100 kg | - Altura graduable 73-93 cm | - Alto asiento 54 cm |

Apertura y plegado del caminador

⚠ Cuando utilice el andador este deberá estar siempre completamente abierto y anclado.

- Empuje la barra transversal (1) del sistema de plegado hacia abajo para la apertura.
- Tire de la barra transversal (1) del sistema de plegado hacia arriba para plegar el andador.


**Montaje de las empuñaduras**

- Retire en su caso los tapones de los extremos de los tubos laterales
- Monte la empuñadura derecha en el orificio derecho y la empuñadura izquierda en el orificio izquierdo, con las partes hacia el interior y la parte ondulada donde se ubicarán los dedos de la mano en el exterior.

Regulación

- Utilice los pomos (2) para fijar los tubos a la altura correcta. Saque completamente el tornillo, regule los tubos a la altura deseada y vuelva a insertar el tornillo por el orificio fijándolos con los pomos (2).

- Se debe ajustar de manera que la empuñadura esté a la altura (3) de la muñeca del brazo del usuario en reposo.

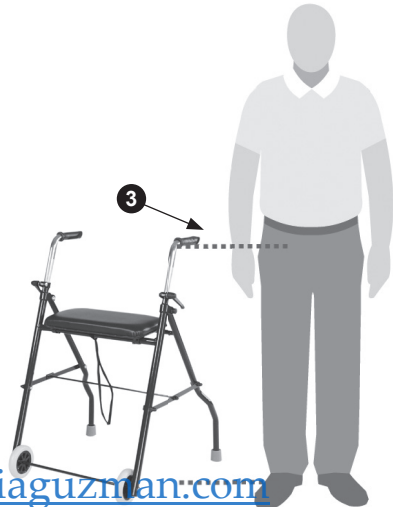

Limpieza

www.ortopediaguzman.com

No utilice detergentes abrasivos para limpiar el caminador. Un paño suave y agua jabonosa tibia son normalmente suficientes para mantenerlo limpio.

Mantenimiento

Es importante comprobar regularmente el buen funcionamiento de los frenos. Verifique que las ruedas giren libremente y estén en buen estado.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

www.ortopediaguzman.com



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



Fabricado por:
HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO., LTD.
No. 1, Chuangye Street, Southwest Industrial District, Matou
Ecological Industry Park, Handan City, Hebei Province, China

www.ortopediaguzman.com

AD 250 - Versión 1.0 - 2016/6