

LOS DISPOSITIVOS DE AYUDA TECNICA A LA POSTURA

www.ortopediaguzman.com
EN POSICIÓN TUMBADA

Cojines de posicionamiento en microbolas de poliestireno ligeras mantenidas en un envoltorio impermeable y transpirable en funda soldada CIC.



** Evita el desarrollo de microorganismos

Prevención de las escaras al nivel del trocánter, del sacro y de los talones.

Los expertos recomiendan la posición en decúbito lateral a 30°.
LA SOLUCIÓN **ASKLÉ SANTÉ**




- 2 tamaños para una adaptación óptima a la morfología de los pacientes
- Una almohada integrada para el confort del paciente
- Una instalación rápida y fácil sin esfuerzos
- Un mantenimiento estable y sostenible

Prevención de las escaras al nivel de los codos y de los talones.

Los expertos recomiendan la puesta en descarga total de los codos y los talones.

LA SOLUCIÓN **ASKLÉ SANTÉ**

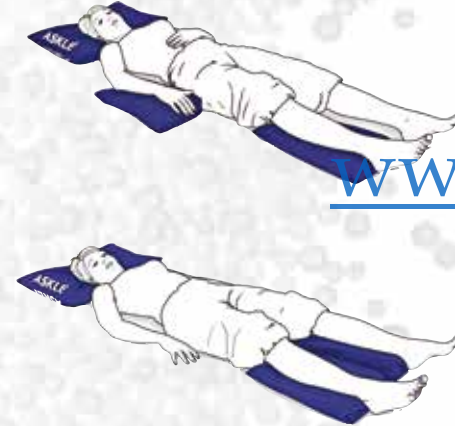

- Inclinación moderada que preserva la articulación sanguínea
- Estructura no traumática
- Forma maleable

Prevención de las escaras al nivel del sacro, de los isquiones y de los talones.

Los expertos recomiendan una posición llamada "semi-Fowler" para reducir la presión ischiática et talonera y el cizallamiento de la piel al nivel del sacro.

LA SOLUCIÓN **ASKLÉ SANTÉ**



- Reducción del deslizamiento hacia delante
- Mantenimiento lateral del tronco
- Alternativas a las camas con somieres no articulados

Prevención de las escaras al nivel de los maléolos y de las rodillas.

Los expertos recomiendan la abducción de los miembros inferiores para reducir la presión al nivel de los maléolos y de las rodillas.

LA SOLUCIÓN **ASKLÉ SANTÉ**



- El mantenimiento de los miembros inferiores en abducción
- La reducción de los puntos de contacto entre las rodillas

GUIA PARA LA MOBILIZACION ALTERNADA

• 8h	LAVADORA - DESAYUNO
• 9h	
• 10h	VISITAS Y APARATOS MEDICOS Y PARAMEDICOS
• 11h	
• 12h	DESAYUNO
• 13h	
• 14h	SIESTA - VISITA
• 15h	
• 16h	ALMUERZO VISITAS Y APARATOS MEDICOS Y PARAMEDICOS
• 17h	
• 18h	CENA
• 19h	
• 20h	ACTOS PARAMEDICOS
• 21h	
• 22h	
• 23h	AYUDA CUIDADORES
• 24h	
• 1h	
• 2h	AYUDA CUIDADORES
• 3h	
• 4h	
• 5h	AYUDA CUIDADORES
• 6h	
• 7h	

Accesorios de posicionamiento en material viscoelástico ALOVA protegido por una protección impermeable, transpirable y barrera contra los microorganismos



LAS DESCARGAS TALONERAS ALOVA



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Descarga total del talón



INDICACIONES

- Escaras del talón constituidas
- Pérdida de movilidad de los miembros inferiores sin riesgo de esquinismo
- Uso de multipacientes



FERULA ELEVADORA DE PIE CON UNA DESCARGA DEL TALON



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Prevención de una posición viciosa del pie
- Prevención de la escara del talón o ayuda al tratamiento de la escara constituida del talón
- Uso de multipacientes

EL DECUBITO




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Un mantenimiento estable y sostenible de una persona tumbada en una posición lateral a 30°.

INDICACIONES

- Prevención de las escaras al nivel del sacro
- Escaras del sacro constituidas de un grado 1 a 2
- Uso multipacientes

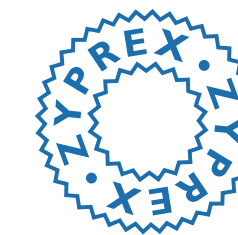

Accesorios de posicionamiento en material ZYPREX o Gel fluido.



MINI TALONERA ZYPREX

TALONERA DE GEL FLUIDO



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Descarga de la región del talón
- Reducción de la presión de apoyo

INDICACIONES

- Prevención de la escara del talón
- Escaras del talón constituidas
- Uso para paciente único



Se recomienda proceder a cambios de posición cada 2 o 3 horas teniendo en consideración el paciente, sus necesidades y sus costumbres. «Prevención y tratamiento de las escaras de adultos y personas mayores. Dec.2001. Haute Autorité de Santé.
La frecuencia de los cambios de posicionamiento pueden ser influenciados por el tipo de soporte utilizado. Esta frecuencia podrá ser reducida con una superficie de espuma viscoelástica» International Guideline, EPUAP, 7 de enero de 2010.

